



- 1 Nylonfaden an der Backe einfädeln.
Insert nylon thread into the endpiece.

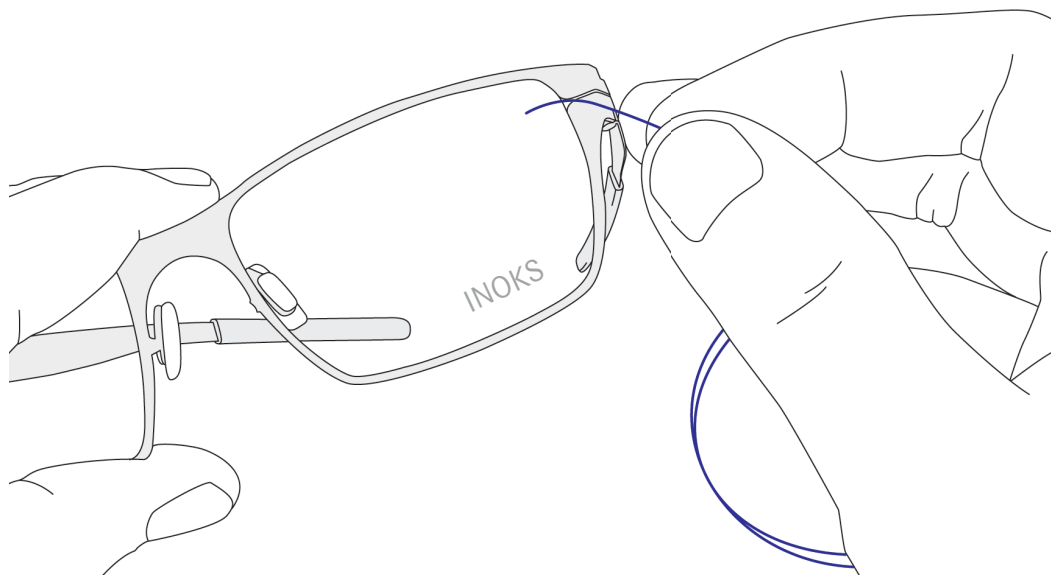


- 2 Nylonfaden in die untere temporale Ecke des Fassungsrandes ziehen.
Fassungsrand dann aus der Nut nach hinten ziehen.
Pull the nylon thread into the lower temporal corner of the rim.
Pull back the rim off the groove.

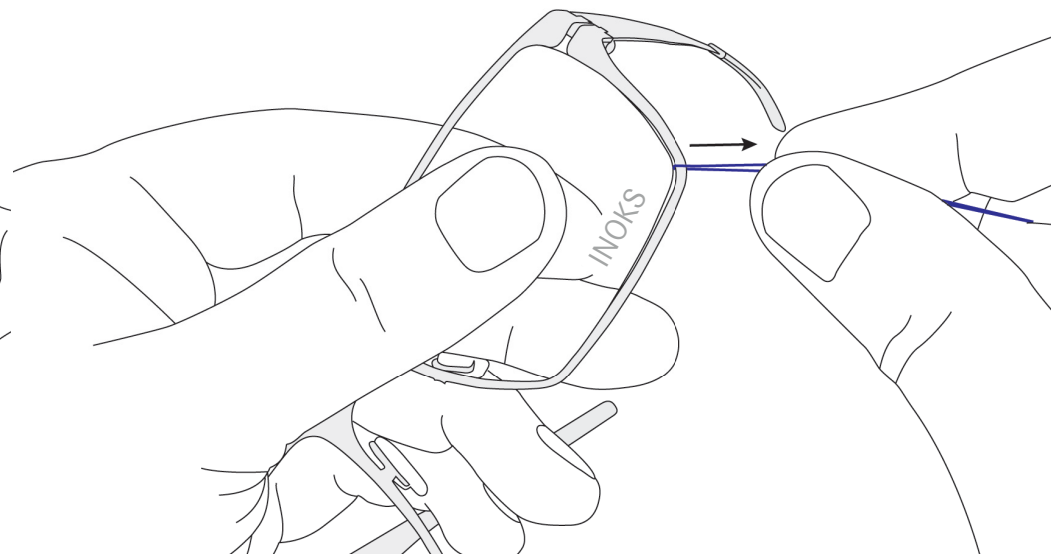

- 3 Glasgröße des Korrektionsglases:
Korrektionsglas = Stützscheibe + 0,1 mm

Size of prescription lens:
Prescription lens = demolens + 0,1 mm


Rillmaße:
Groove measurements:

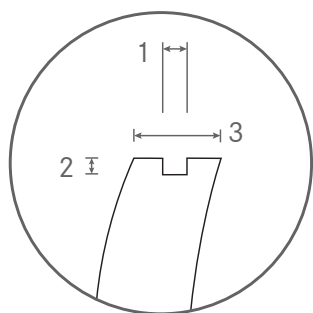


1 Nutbreite groove width	0,8 mm
2 Nut-Tiefe groove depth	0,4 mm
3 min. Randdicke minimum edge thickness	2,0 mm

Angegebene Maße sind Endmaße. Bitte nachmessen!
The given dimensions are final dimensions. Please measure!

- 5 Den temporalen Fassungsrand in die Nut klicken.
Click the temporal rim into the groove.

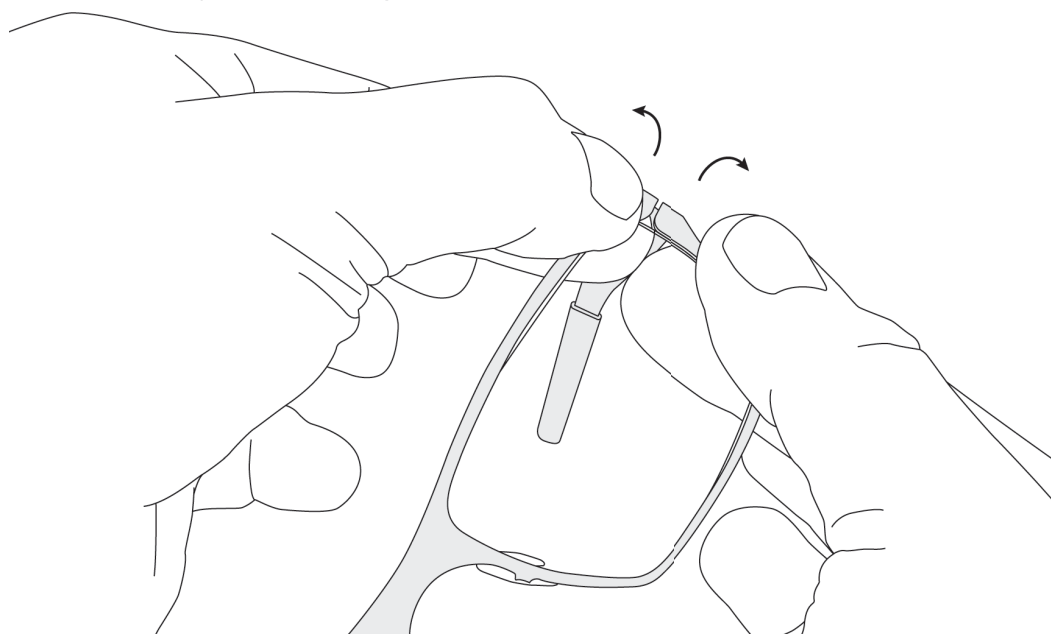

- 4 Das Korrektionsglas rückseitig einsetzen. Beginnen Sie am nasalen Fassungsrand.
Insert the correction lens from the back. Start at nasal rim.

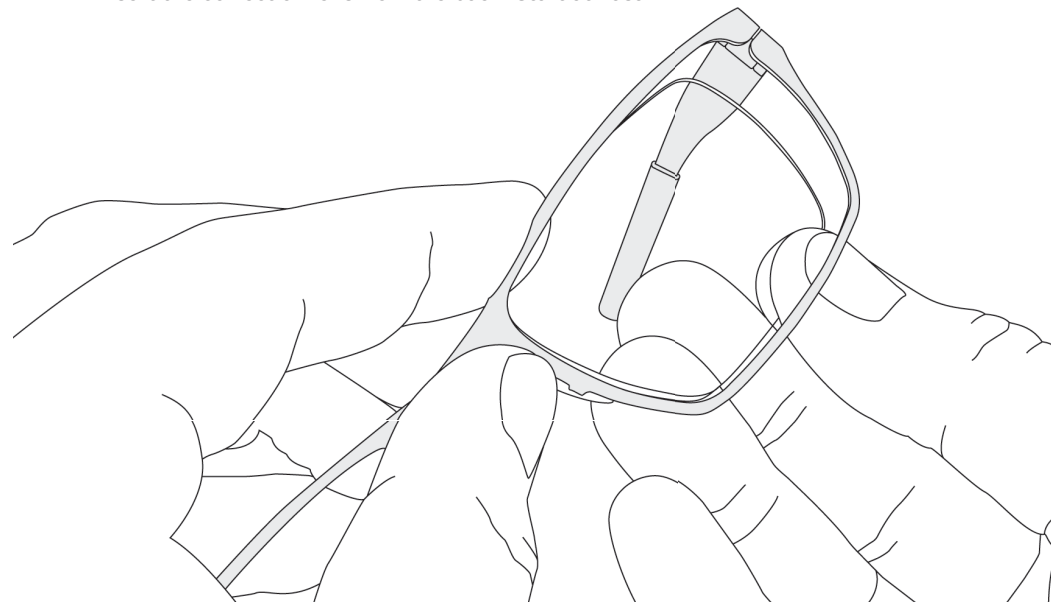

INOKS

THE BEST HANDS CAN MAKE FOR YOUR EYES.

MADE IN GERMANY
05.2019